

## Aanbrenginstructie Eakin Cohesive® pastaringen



- 1** Zorg voor een schone, droge en vetvrije huid.  
Gebruik geen crèmes.



- 2** Verwijder de beschermende film van de ring.  
Rek en kneed de Cohesive® pastaring tot deze de juiste vorm en grootte heeft.  
Het maakt niet uit welke kant van de ring op de huid aangebracht wordt. Beide zijden hebben kleefkracht.



- 3** Breng de Cohesive® pastaring aan op de huid rondom uw stoma.  
Laat de ring aansluiten aan de roos van uw stoma.



- 4** Zorg dat de ring de volledige omtrek van uw stoma overlapt.  
Let op dat er geen huid meer zichtbaar is tussen uw stoma en de Cohesive® pastaring.



- 5** Druk de randen van de pastaring aan.  
De warmte van uw hand versterkt een goede hechting en afsluiting.



- Plaats vervolgens uw stomamateriaal:  
**6** **1-delig:**  
Breng uw stomazakje aan en houdt het kort aangedrukt.  
**2-delig:**  
Breng de huidplak aan op de pastaring. Bevestig uw zakje zoals gebruikelijk.

eakin healthcare bv

Lingewei 9 ▲ 4004 LK Tiel ▲ T +31 (0)344 - 65 23 51 ▲ F +31 (0)344 - 65 23 17 ▲ [www.eakin.nl](http://www.eakin.nl) ▲ [info@eakin.nl](mailto:info@eakin.nl)  
KVK 11064819 ▲ BTW NL 8155.18.249.B01 ▲ BIC RABONL2U ▲ IBAN NL14 RABO 0157 5292 58

**Eakin Cohesive® pastaringen**  
voor elke situatie een **passende oplossing**



**Cohesive® Large (839001):**

- Ideaal voor urostoma's
- Voor grote huidoppervlaktes
- Helpt irritatie door huidplak voorkomen
- Voor gebruik met diepe convexiteit
- Huidbeschermend rond wonden



**Cohesive® Small (839002):**

- Voor maximale huidbescherming
- Bij high output
- Helpt lekkages oplossen
- Verlengt draagtijd stomazakjes
- Biedt soft convexiteit



**Cohesive® SLIMS® (839005):**

- Voor dagelijkse huidbescherming en veiligheid
- Bij veelvuldig wisselen stomazakje (elke 2-3 dagen)
- Voor lichte huidirritatie
- Creëert optimale pasvorm bij voorgestante maten
- Ideaal bij convex stomazakjes



**Cohesive® StomaWrap™ (839006):**

- Ideaal voor grote of ovale stoma's
- Geschikt bij verminderde handfunctie
- Huidbeschermend rond wonden
- Geschikt bij Negatieve Druk Wond Therapie
- Snel en eenvoudig aanbrengen

Meer informatie over Eakin Cohesive® pastaringen?  
[www.eakin.nl](http://www.eakin.nl)

eakin healthcare bv

Lingewei 9 ▲ 4004 LK Tiel ▲ T +31 (0)344 - 65 23 51 ▲ F +31 (0)344 - 65 23 17 ▲ [www.eakin.nl](http://www.eakin.nl) ▲ [info@eakin.nl](mailto:info@eakin.nl)  
KVK 11064819 ▲ BTW NL 8155.18.249.B01 ▲ BIC RABONL2U ▲ IBAN NL14 RABO 0157 5292 58